

Instrukcja używania

MUCOVAGIN[®]

Kwas hialuronowy 5mg

Globulki dopochwowe

Optymalne nawilżenie i odnowa
błony śluzowej pochwy

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

www.mucovagin.pl



HELP SA

10 Valaoritou St., 14452 Metamorphosis, Greece

CE
0653

MUCOVAGIN®

Kwas hialuronowy 5mg Globulki dopochwowe

OPIS I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

MUCOVAGIN wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Zalecany jest szczególnie w stanach atrofii i dystrofii. Ułatwia leczenie i gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii będącej następstwem chemioterapii lub radioterapii. Łagodzi stany zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów na skutek menopauzy. Zalecany także do stosowania wspomagająco w stanach dystrofii wywołanych długotrwałym podawaniem glikokortykoidów.

MUCOVAGIN nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Aktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego.

Kwas hialuronowy wiążąc się z wilgotną wydzielaną błoną śluzową pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych.

W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogenicznej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA

MUCOVAGIN należy używać tylko wewnętrznie, miejscowo do pochwy.

Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć ręce.

MUCOVAGIN jest zapakowany w folię ochronną. W celu wydobywania globulki z folii należy:

- oddzielić jedno gniazdo poprzez rozerwanie perforacji,
- rozchylić listki folii i ostrożnie rozwierając części folii na zewnątrz wydobyć globulkę,
- w pozycji leżącej, umieścić globulkę głęboko w pochwie,
- globulki nie wolno aplikować z fragmentami folii ochronnej,
- jeśli globulka jest zbyt miękka, należy (nie wyjmując jej z ochronnego opakowania) na kilka minut włożyć ją do lodówki lub pod strumień zimnej, bieżącej wody.

Zaleca się stosowanie jednej globulki dziennie, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

MUCOVAGIN jest dobrze tolerowany i o ile lekarz nie zaleci inaczej, może być stosowany przez dłuższy okres.

Czas stosowania zależy od stopnia nasilenia i rozwoju objawów.

Zbyt długotrwałe stosowanie miejscowe może spowodować reakcję nadwrażliwości.

PRZECIWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wyrób przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego, miejscowo do pochwy. Nie połykać!
- Unikać kontaktu globulki z oczami.
- Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone!
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanemu na opakowaniu!
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie wyrobu.
- Nie stosować globulek w trakcie menstruacji.
- Cięża i karmienie – kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować globulki zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja używania

- Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane. Każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub farmaceuty.
- Stosować tylko zgodnie z instrukcją używania!

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD

Aktywnym składnikiem globulek dopochwowych jest kwas hialuronowy.

Jedna globulka zawiera: kwas hialuronowy (5mg) w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego, tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne).

OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SYMBOLI



należy zapoznać się z instrukcją używania przed zastosowaniem



znak zgodności CE



wytwórcza



numer serii



użyć przed końcem



ostrzeżenie

Data opracowania instrukcji: 12.2014

MUC10I/011114