

kwasy hialuronowy
MUCOVAGIN[®]
żel

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

www.mucovagin.pl



10 Valaoritou St. 14452 Metamorphosis, Greece
FABRYKA: Pedini, GR 45500 Ioannina, Greece



Data opracowania instrukcji: 12.2014
MUC25/1/011218
7 aplikatorów

Instrukcja używania

kwasy hialuronowy
MUCOVAGIN[®]
żel

Żel dopochwowy

Optymalne nawilżenie i odnowa
błony śluzowej pochwy

CE
0653

kwasy hialuronowy

MUCOVAGIN® żel

OPIS I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

MUCOVAGIN ŻEL ma długotrwałe działanie nawilżające i poślizgowe.

MUCOVAGIN ŻEL wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Zalecany jest szczególnie w stanach atrofii i dystrofii. Ułatwia leczenie i gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, dystrofii. Ułatwia łagodzenie stanów zapalnych i pomaga zmniejszyć dyskomfort spowodowany suchością błony śluzowej pochwy związanej z wiekiem lub niedoborem estrogenów na skutek menopauzy. Zalecany także do stosowania wspomagająco w stanach dystrofii wywołanych długotrwałym podawaniem glikokortykoidów.

MUCOVAGIN ŻEL nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych. Ułatwia kontakty intymne.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Kwas hialuronowy, aktywny składnik preparatu jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy wiążąc się z wilgotną wydzielaną błoną śluzową pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA

MUCOVAGIN ŻEL należy stosować dopochwowo lub na okolicie zewnętrznych narządów płciowych. Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.

» Dopochwowy sposób użycia:

1. Przed pierwszym użyciem usunąć zamknięcie z tubki
2. Przykręcić jednorazowy aplikator do tubki (patrz rysunek)



3. Delikatnie napełnić aplikator do pożądanej ilości żelu. Standardowo jest to 2,5 ml. Odcłęgnąć aplikator od tubki. Po każdym użyciu zakręcić tubkę.
4. Nie przechowywać żelu w aplikatorze przez czas dłuższy niż 30 minut przed użyciem. Oznacza to, że nieużyty żel w aplikatorze w ciągu 30 minut należy wyrzucić wraz z aplikatorem.
5. W pozycji leżącej wprowadzić delikatnie aplikator głęboko do pochwy i nacisnąć tłok do oporu. (patrz rysunek)



6. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy.
7. W celu uzyskania właściwego nawilżenia pochwy, po podaniu produktu należy lekko przeć.
8. W razie potrzeby można usunąć jednorazową chusteczką nadmiar żelu znajdującego się na sromie.
9. Po użyciu wyrzucić aplikator.

NIE UŻYWAĆ PONOWNIE APLIKATORÓW.

» Sposób użycia na okolicie zewnętrznych narządów płciowych:

Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolicie zewnętrznych narządów płciowych.

Zaleca się stosowanie żelu co 3 dni, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.

MUCOVAGIN ŻEL jest dobrze tolerowany, i o ile lekarz nie zaleci inaczej, może być stosowany przez dłuższy okres czasu, ale nie dłużej niż miesiąc.

Działania uboczne:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie produktu.



Ostrzeżenia:

- Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowego lub na okolicie zewnętrznych narządów płciowych.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Zamknąć tubkę bezpośrednio po użyciu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu!
- Nie stosować żelu w trakcie menstruacji.
- Cięża i karmienie – kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować żel zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty.
- Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane. Każdorazowo należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub farmaceuty.
- Stosować tylko zgodnie z instrukcją użycia!

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zużyć w ciągu miesiąca od pierwszego otwarcia.

SKŁAD

kwasy hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanolamina.

OPAKOWANIE

Każde kartonowe pudełko zawiera tubę aluminiową 25 g z 7 jednorazowymi aplikatorami.

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa



www.mucovagin.pl

HELP SA

10 Valaoritou St. 14452 Metamorphosis, Greece
FABRYKA: Pedini, GR 45500 Ioannina, Greece

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SYMBOLI

– Ostrzeżenia

– Zajrzyj do instrukcji używania

– Termin ważności

– Numer serii

– Znak zgodności

– Wytwórca

– Aplikatory do użytku jednorazowego